

高速(High)と低速(Low)の2種類の流速で、創傷や整形外科用の洗淨や感染症防止を目的としたパルス式洗淨ユニット。  
完全ディスポーザブルで感染リスクを回避します。

創傷・整形外科用洗淨システム

# パルス洗淨 ユニット

PL1000B

滅菌済み

ディスポーザブル

## 特長


高低2段階のトリガー設定により、骨折部は強力に洗淨、軟部組織には、優しく洗淨することが可能。バッテリーケースは本体と別体なので軽い使用感です。お手持ちのサクションユニットを繋げれば、洗淨と吸引を同時に行うことができます。



骨折の術野洗淨、骨片除去も効率よく行います。



## キット内容

- ・本体(バッテリーケーブル 約3m)
- ・洗淨用チューブ(約3m)
- ・吸引用チューブ(約3m)
- ・バッテリーパック
- ・ファンスピーアチップ(シールド付)  
関節手術、軟部組織へも対応するワイドな噴射パターン

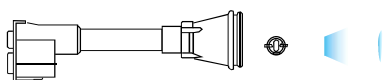

## ・髄腔用チップ

360°の噴射パターンで幅狭タイプです。股関節手術に

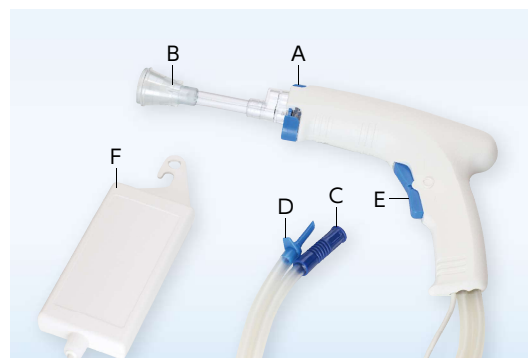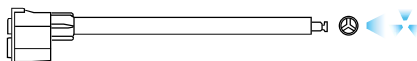

## 使用方法

- ① 固定リング(A)を上方向にスライドさせ、ロックを解除する。
- ② 使用するチップ(B)を本体に付ける。しっかりと装着されるまで押し込む。髄腔用チップを使用する時は使用前に白いキャップを外す。
- ③ 固定リングを下方向にスライドさせ、使用するチップを固定する。チップを取り外す場合は固定リングのロックを解除する。
- ④ バッテリーパック(F)を適切な位置に取り付ける。
- ⑤ 洗淨用チューブ(D)を生理食塩水用のボトルに接続する。
- ⑥ 吸引用チューブ(C)を吸引キャニスターに接続する。
- ⑦ トリガー(E)からプロテクターを外す。高速洗淨の場合はトリガーの上部を押し、低速洗淨の場合は下部を押し。中央部を押しと停止する。
- ⑧ 吸引用チューブに付いているクランプを使用すると吸引量を調整することができる。
- ⑨ 使用後はチューブを抜き、適切に廃棄する。

**廃棄時の注意** ●バッテリーが入ったまま、ケーブルを切断すると、感電・発熱・発火等の恐れがありますので、絶対に切断しないでください。●バッテリーパックを液体に浸さないでください。●バッテリーはアルカリ乾電池です。バッテリーの取り外しには帯電防止のためのゴム手袋と防護メガネをして対応してください。●廃棄は地域の環境、施設の指定廃棄環境に基づいて廃棄してください。



## パルス洗淨ユニット

品番：PL1000B

↑ [ご注文・お問い合わせ](#)

私たちは、世界の獣医療が認めた確かな製品を厳選してお届けします

製造販売元  
(輸入販売元)

**株式会社 キリカン洋行**

☎03-6718-4300 FAX 03-6718-4324

〒108-0075 東京都港区港南5-4-12 横浜倉庫7F

[www.kirikan.com](http://www.kirikan.com) E-mail: info@kirikan.com

Copyright© Kirikan Ltd. All Right Reserved. 掲載された記事、写真、イラスト等の無断複製、転載を禁じます。