

お客様各位

武藤化学株式会社
テルモ株式会社

謹啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素は格別のお引き立てを賜り、深謝申し上げます。
テルモ株式会社製キャピロットの代替えとして下記ご紹介致します。

謹白

記

■製品規格

1) 網赤血球染色用試薬 (武藤化学株式会社)

品番	品名	容量	価格
15861	ブレッヒャー・ニューメチレンブルー液	100mL	¥1,000
15862	貯法：冷蔵庫保存 有効期限：製造後 1年	500mL	¥3,500

〔使用法〕

ヘマトクリット用毛細管の1/3まで血液をとり、本液を2/3までとり混和15～20分放置後その1滴を塗抹する。

2) 尿沈渣染色用試薬 (武藤化学株式会社)

品番	品名	容量	価格
50171	ラボステイン (クリスタル紫とサフラニン0の混合液)	5mL×5A	¥1,500
50172	貯法：冷蔵庫保存 有効期限：製造後6ヶ月	100mL	¥3,000

〔使用法〕

- 1) 新鮮尿を500g、5分遠心して下さい。
- 2) アスピレーション法もしくはデカント法で上清を除去して下さい。
- 3) ラボステインを1滴加えよく混和します。
- 4) 2～5分間染色して下さい。
- 5) スライドガラスに沈査を1滴とり、18×18mmのカバーガラスをかけ鏡検して下さい。

■調達方法

代理店経由での販売となります。お取引のあるいずれの代理店様でも調達は可能です。

■お問い合わせ

武藤化学株式会社



〒113-0033 東京都文京区本郷2-10-7 <http://www.mutokagaku.com/>

03-3814-5511 (午前9:00～午後17:00 (土・日・祝日は除く))

～使用方法の比較は裏面をご覧ください～

武藤化学株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2-10-7
<http://www.mutokagaku.com/>テルモ株式会社 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-44-1
<http://www.terumo.co.jp/>

代替品の武藤化学㈱製の染色用試薬は液状のため下記のような使用方法となります。
尚、詳細は製品の取り扱い説明書をご確認ください。

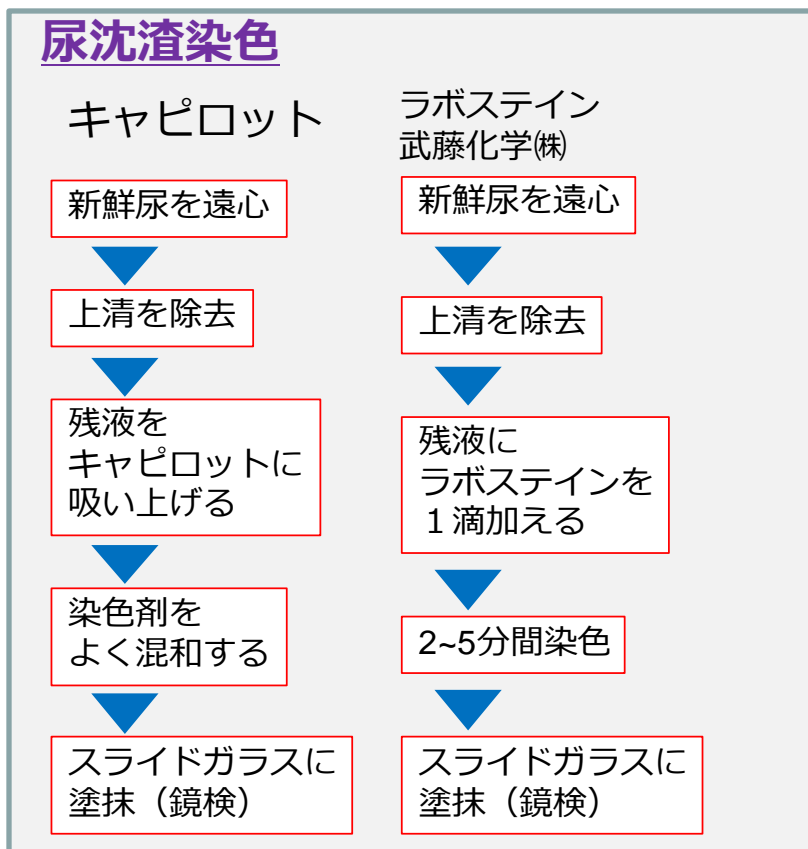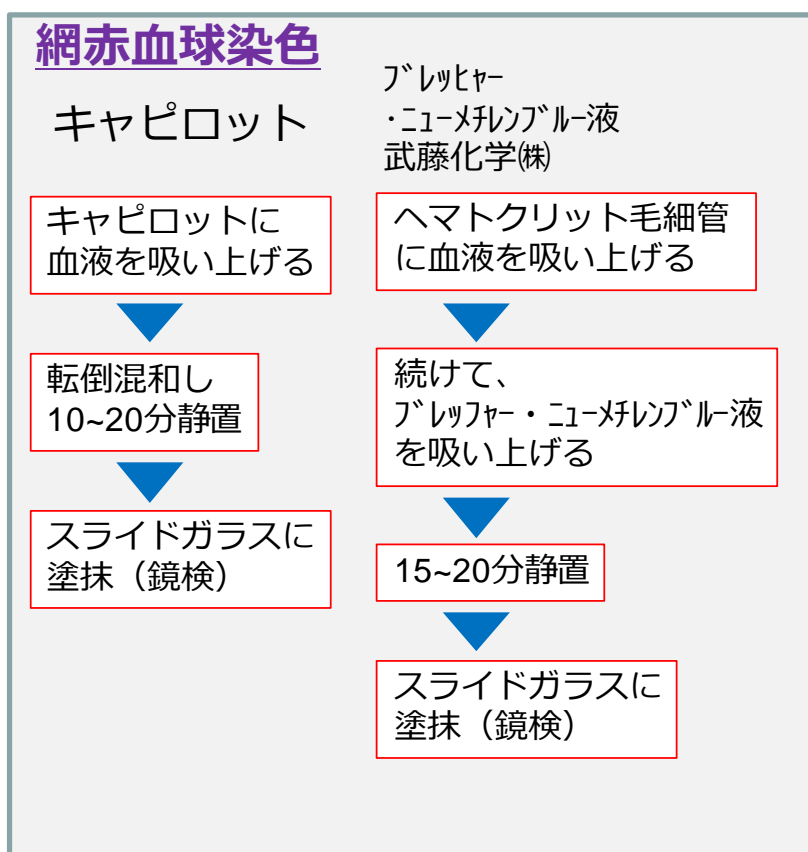

以上