


お薬を気管支・肺に“直接届ける”を
助けるスパーサー



なぜ吸入がいいの？

全身を巡らず、
患部にピンポイントで届くから負担が少なく、
犬猫思いのやさしい治療のかたちです。

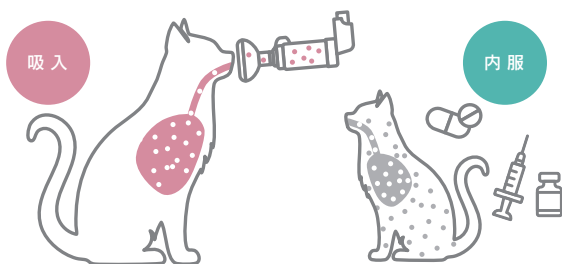

吸入のメリット



少ない量でしっかり効く

経口薬や注射は全身に作用しますが、吸入療法は薬剤を直接、患部（気管支・肺）に届けるため、効率よく効果を発揮します。



長期管理に最適

副作用が少ないため慢性疾患の長期管理に適しています。



体への負担も軽減

必要な場所にだけ作用することで、全身への負担が少なくなります。

※本製品に吸入薬（定量噴霧式吸入器：MDI）は付属していません。

仕様

製品名	動物用吸入器アニエア スパーサー （動物用一般医療機器）
製品番号	AS-DL10
耐用期間	1年または1460回
使用環境温度／湿度	1～35℃／40～65％RH
保管環境温度／湿度	1～35℃／40～65％RH
寸法	本体 52×66×141mm マスク S φ60×47mm （挿入口φ36mm） マスク M φ76×52mm （挿入口φ39mm）
質量	本体 46g マスク S 16g マスク M 24g
付属品	取扱説明書
品質保証	ご購入後1年

製造業登録番号： 2製造療第17号
製造販売業許可番号： 5製販療Ⅱ第201号

製造販売元： 株式会社アステック
茨城県つくば市東新井14-3



お問合せ先



AniAir Spacer

AS-DL10

動物用吸入器 アニエア スパーサー

2サイズ展開 S/M

薬を直接、
気管支・肺に届けるから
少ない量で
しっかり効く

副作用が少なく
体への
負担も軽減

呼吸器の病気の
長期管理に
最適



アニエアスパーサーの特長

POINT

3

やさしくフィットするマスク

やわらかいシリコン素材を使用し、マズルにやさしくぴったりフィット。ストレスの少ない快適な使い心地です。

POINT

1

呼吸弁で安心チェック

マスクがマズルにしっかりフィットし、呼吸に合わせて弁が動くことで、呼吸の状態を目で確認できます。

POINT

4

小さな子にもやさしい設計

呼吸の弱い小型のワンちゃんネコちゃんでも吸入しやすい設計。薬剤が逆流しない構造で、安心して使用できます。

POINT

2

静電気をブロック

チャンバー内に薬剤が付着しないよう、帯電防止素材を採用。より多くの薬剤を効率よく吸入できるよう工夫されています。

マスクサイズに対する体重の目安


サイズ S

体重
0～4.5kg



サイズ M

体重
4.5kg～

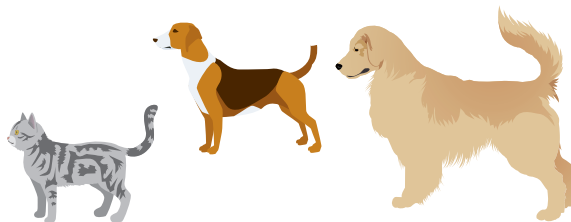

※体重の目安はあくまで参考です。

使用方法を
動画で
チェック!



マスクサイズの選び方


下のサイズガイドを目安にサイズS(直径3.6cm)とサイズM(直径3.9cm)の2種類から選びください。

※サイズガイドは目安にご利用ください。



左の黒い円を正面からマズルに当てた時、鼻と口が覆われますか？

サイズ S

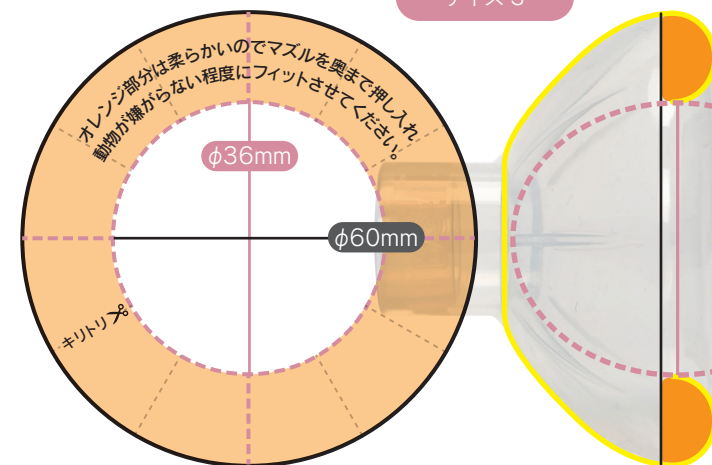

サイズ M

