
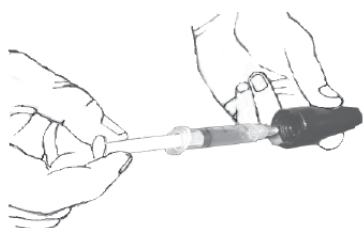


セフティアームの使用法

この度はセフティアームをお買い上げ頂き有り難うございます。
この製品は、ちょっと離れた所から注射筒をコントロール出来る様考案された物です。下記要項にしたがって御利用ください。

※注射筒はテルモ製・JMC製2.5CC用が使用出来ます

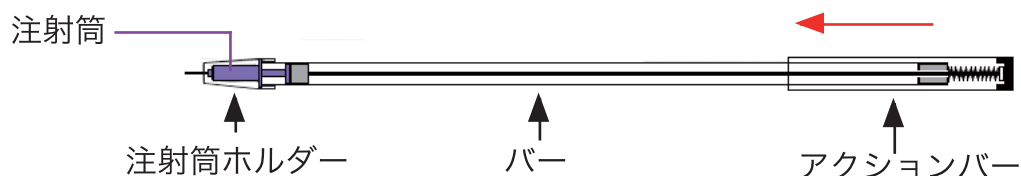


まず注射筒に薬液を使用量用意し、そのままの状態
で注射筒ホルダーに静かに装填します。



注射筒のつばを注射筒ホルダーの凹部に合わせ軽く
セットします。



セットが終わる迄、注射筒の射出棒に触ると液が
吐出しますので注意して下さい。図の様にセット
されましたら注射筒ホルダーをバーの先端に
ねじ込みます。

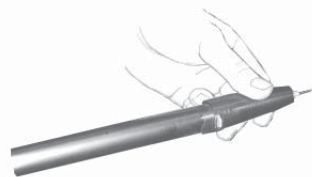

つばがバーに当たる迄回転させながら、
ねじ込みます。この際アクションバーを押さない様に気を
付けて下さい。吐出する可能性があります



この状態でセット完了です。片手でバーをしっかり持
ちアクションバーをもう一方の手で握りアクションバ
ーを前に送りますと注射針より薬液が吐出されます。

凶暴な犬で口内より注入可能な薬液の場合、注射針をセットせず
先端を犬が噛みついた瞬間に薬液を口内に吐出する事も出来ます。

本製品を本格的に使用する前に数回薬液の変わりに水等を使用しセット及び
アクションに対しての感覚を習熟してください。

製造販売：株式会社 津川洋行

東京都八王子市叶谷町1012-10

TEL:042-625-8409