

SunTech[®] Vet20[™]

BP MONITOR

ヴェット・トゥエンティー
犬猫用血圧計 Vet 20


すばやく、静かに、手軽に使える自動血圧計



体の大きさに合わせた血圧測定

Memory							
#	Sys	Dia	HR	MAP	Animal		
10	122	80	110	94	Large	▲	
9	118	79	85	95	Large	■	
8	⚠ Air leak in hose						
7	119	80	95	94	Large		
6	120	77	100	95	Small	▼	

50データ分の記録

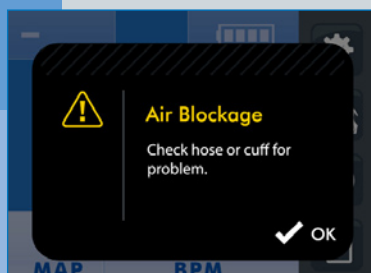

わかりやすい警告メッセージ



- 体動に強い血圧測定技術
- 犬・猫専用の血圧測定アルゴリズム
- 軽量コンパクトで持ち運びに便利
- 乾電池使用

- 小型・軽量、持ち運びに便利で、手軽に測定できる犬・猫専用自動血圧計です。
- 麻酔下だけではなく、外来でも手軽に診察に利用できます。
- 乾電池による動作と、小型・軽量設計により、ペットを移動させることなく血圧測定ができます。
- 静音設計により、ペットへの不快感を最小限に抑えます。
- 簡単なタッチパネル操作で、血圧測定履歴や血圧平均値などを素早く表示します。

主な特徴

測定精度 犬猫の血圧測定は人間に比べると難しく、測定精度が十分に検証されている血圧計は少ないのが現状です。本製品は、ACVIM（米国獣医内科学会）が作成した血圧に関するガイドライン⁽¹⁾で定められた血圧計の測定精度評価方法に基づいて測定精度の評価が行われており、その有用性が学術的に示されています。⁽²⁾⁽³⁾

(1) “Guidelines for Identification, Evaluation, and Management of Systemic Hypertension in Dogs and Cats”, ACVIM Consensus Statement, 2007

(2) “Agreement between two oscillometric blood pressure technologies and invasively measured arterial pressure in the dog”, Anderson F da Cunha 他, Veterinary Anaesthesia and Analgesia, 2015


(3) “Validation of the oscillometric blood pressure monitor Vet20 SunTech in anesthetized healthy cats”, Jeannette Cremer 他, Veterinary Anaesthesia and Analgesia 2020

操作性 最小限のボタンとタッチパネルスクリーンにより、簡単で直感的な操作方法を実現しました。測定履歴（最大 50 回分）の閲覧や、複数回測定結果の平均計算を、簡単な動作で素早く行えます。

静音性 ポンプや電磁弁の騒音を抑え、ペットが感じる不快感を抑え、スムーズな診療をサポートします。

迅速さ 血圧測定方法にオシロメトリック法を採用し、素早く血圧測定を行います。

利便性 乾電池（単 3 型 4 本）で動作し、小型・軽量なので持ち運びに便利です。ペットを移動させることなく、リラックスできる場所で手軽に測定できます。

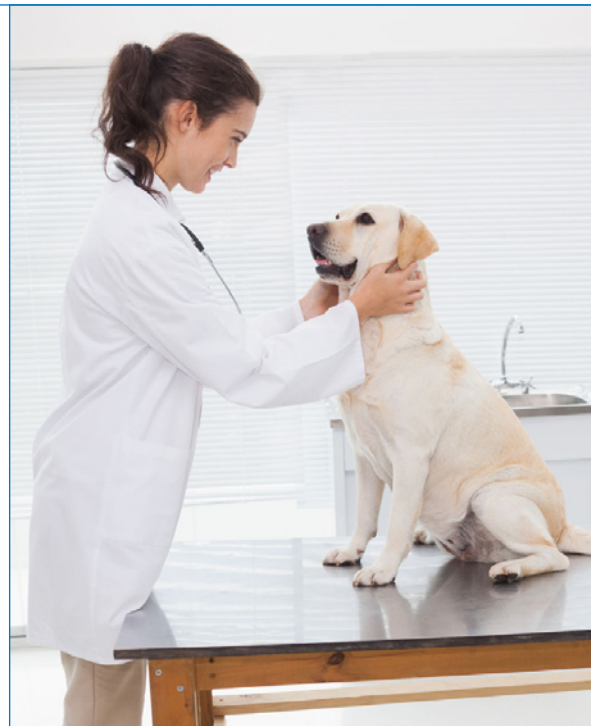

製品仕様


測定範囲（収縮期血圧）	40 ~ 265 mmHg
測定範囲（拡張期血圧）	20 ~ 200 mmHg
測定範囲（平均血圧）	27 ~ 222 mmHg
測定範囲（心拍数）	25 ~ 300 bpm
重量	590g（電池を除く）
寸法	15.9 x 12.7 x 13.3 cm
保証期間	1 年保証

カフサイズ

	製品番号	腕周
Vet20 購入時 に同梱	#1	98-0400-80 3 ~ 6 cm
	#2	98-0400-81 4 ~ 8 cm
	#3	98-0400-82 6 ~ 11 cm
	#4	98-0400-83 7 ~ 13 cm
	#5	98-0400-84 8 ~ 15 cm
	#6	98-0400-F1 12 ~ 19 cm
別売	#7	98-0400-F3 17 ~ 25 cm

*カフはラテックスフリーです。

製造販売元

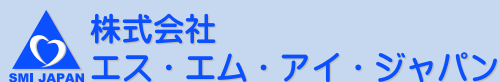

東京都台東区烏越 1-4-3 ミハマビル 4F
TEL: 03-5829-9079 FAX: 03-5829-9089
URL: <http://www.smijapan.com/>

製造元



SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd Suite 100 Morrisville, NC
27560-8394 USA
<https://www.suntechmed.com/>

国内販売店



Metran

株式会社メトラン

Tel: 048-242-0333 / Email: support@metran.co.jp

〒332-0015 埼玉県川口市川口 2 丁目 12 番 18 号