

セラミック電気温灸器

muRata
INNOVATOR IN ELECTRONICS



先端部にはセラミックを使用

皮膚にやさしい素材のため、アレルギーを起しにくいです。また、消毒用アルコールで全面の拭き取りができ、清潔を維持できます。

※消毒液が製品の内部に入らないようにしてください。
故障の原因となります。

見やすい液晶とお知らせ機能

業界初*の現在温度のリアルタイム表示に加え、分かりやすい通知音、消し忘れ防止機能が付いています。

※製販・製造: 柳村田製作所調べ。



●ブラック

○ホワイト

ピンポイントな温熱刺激

先端の半径は一般的なもぐさの半米粒大程度(半径2mm)と形状が鋭角であることからピンポイントな点による熱刺激を与えることが可能です。

面での温熱刺激

設定温度をキープしたまま、側面部を使用し患部に合わせた施術も可能です。

5段階での温度制御を実現

設定は43℃から3℃刻みで5段階で温度管理をするため、患者様の個人差や治療内容に合わせた施術が可能です。

※製販・製造: 柳村田製作所測定環境下において。

製品仕様

【電気定格】①本体: DC9V 0.8A、内部電源: DC3.6V 2.2A(専用ニッケル水素充電電池) ②ACアダプタ: 入力AC100V 50/60Hz 0.3A 出力DC9V 1.6A
【充電及び駆動時間】60分以上充電で90分以上使用可能(工場出荷時) 【タイマー】約30分
【サイズ】(長さ)165×(幅)31×(高さ)37mm 【重量】140g(ACアダプタ含まず) 【付属品】台座、専用ACアダプタ(充電用)、取扱説明書(保証書付き)、添付文書
【製造販売業者】株式会社柳村田製作所

ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。

SEIRIN

ISO13485 認証取得

■フリーダイヤル(通話無料)はこちらから



0120-100890

■詳しい情報は、当社WEBサイトでもご覧いただけます

<https://www.seirin.jp>

【販売業者】セイリン株式会社 【住所】〒424-0061 静岡県静岡市清水区大内147番地