

愛犬・愛猫の
歯周病予防に
新習慣!

Manifi[®] DentalGlove^{series}

マニフィー・デンタルグローブ シリーズ

本意匠番号 意願 2011-003540

素手感覚! やさしくブラッシング。

歯磨き使用例 (チワワ 2kg)

超小型犬のチワワもジャレあいながら遊び感覚でしっかりと磨けます。
愛してやまないコンパニオンアニマル (伴侶動物) を楽しくケアしましょう。

まず、最初に!

- 指先のナイロンループ部分で
歯の表面を軽くこすってください。



※強くこすると、歯茎を傷つける恐れがあります。
ご注意ください。


奥歯もしっかりと!

- 奥歯は中指を使って、スライド
させて磨いてください。



犬歯もピカピカに!

- 犬歯は親指と人差し指でつまむ
ようにして磨いてください。

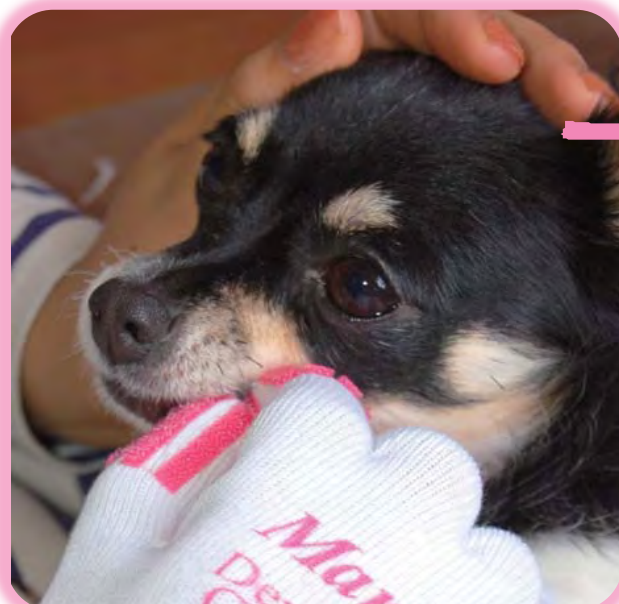

歯の裏側も丁寧に!

- 歯の裏側は、指の腹を使って
磨いてください。



指の両側が
使えて磨きやすく、
便利です。