

愛犬・愛猫の
歯周病予防に
新習慣!

Manifi DentalGlove^{series}

マニフィー・デンタルグローブ シリーズ

本意匠番号 意願 2011-003540

素手感覚! やさしくブラッシング。

歯磨き手順&ワンポイントアドバイス

ズレずに、簡単に、指先の感覚が直接伝わり、キレイに磨けます。
コンパニオンアニマル（伴侶動物）とジャレ合いながら、
楽しくブラッシングができます。

※市販のペット用歯磨き・洗浄液を指先のナイロンループにつけて磨くと、より効果的です。
（使用される場合は、ご使用される商品の使い方や注意事項をよく読んでからご使用ください。）



モデル犬：アトム君（14歳）



まずは、慣れる!

●マニフィー・デンタルグローブをはめ、愛犬に見せ慣れさせましょう。



やさしく、丁寧に!

●指先の感覚を確かめながら、やさしくスライドさせて磨きましょう。



Point

警戒心を取り除くために、
抱っこしてリラックスさせながら、
口のまわりを触り始めると良いでしょう。



奥歯も、しっかりと!

●つまんだり、こすったりして奥歯もしっかりと
磨きましょう。



犬歯もピカピカに!

●犬歯は親指と人差し指でつまむようにして
磨きましょう。

Point

磨き終わったら、
「おめでとうさん!」と
褒めましょう。

